



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Otoklav Cihazı Kullanımı
	Doküman No	T-083
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Kirli aletler kimyasal dekontaminasyon amacıyla % 2'lik Gluteraldehit solüsyonunda 15 dk. Süre ile bekletilir.2. Yıkama işlemine tabi tutularak gözle görülür partiküller uzaklaştırılır.3. Malzemeler Otoklav'a konular 106 kPa basınç ve 121 oC'de, açık malzeme 20 dk. sarılı malzeme 30 dk. süreyle sterilize edilir.4. Otoklav kapatılır aletler kendiliğinden soğumaya bırakılır.5. Sarılı malzeme 1 haftaya kadar kullanılabilir, açık malzeme sıkı kapaklı steril kaptan depolanmalı veya anında kullanılmalıdır.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---